

ENTRETIEN & SAV



1 - Appoint d'eau

2 à 3 semaines après le début d'utilisation de l'appareil, nous vous conseillons de faire un appoint d'eau dans l'appareil.

Vérifiez ensuite régulièrement le niveau d'eau qui doit être toujours au maximum.



ENTRETIEN & SAV



Ouvrir le Coolant liquid fill.

Insérer le tube dans le
Coolant liquid fill et
presser sur la poche
jusqu'à ce que l'eau arrive
au niveau maximum mais
sans jamais dépasser.



ENTRETIEN & SAV



2 - Nettoyage du conduit optique de l'applicateur



Pour assurer une utilisation hygiénique et sans risque de l'applicateur, il est indispensable de maintenir le conduit optique dans un état de propreté impeccable.

Il est de votre responsabilité de vous assurer que le conduit optique est parfaitement propre avant, pendant et après chaque utilisation de votre applicateur.

En cours de soin, retirer l'excédent de gel à l'aide d'un chiffon ou d'un papier non abrasif.

Nettoyage :

Le gel se dissout au contact de l'eau.

Imbiber un chiffon avec de l'eau, nettoyer correctement toutes les parties couvertes de gel, en insistant sur le conduit optique.

Répéter l'opération si nécessaire afin de retirer complètement le gel.

Le conduit doit être transparent, propre, lisse, brillant, sans aucune trace de résidu.

Si optique sale : brûlures ! Un conduit mal nettoyé, avec résidus, poil... brûle la peau.

Désinfection :

Éliminer toutes les bactéries. Pour cela, humecter un chiffon avec un produit adapté.

Pour que l'efficacité soit optimale, laisser agir le produit suivant les instructions de la notice.