

DU NOUVEAU DANS TON PROTOCOLE

D•tattoo-toi.®

Rappelle-toi : nous avons développé LA solution exclusive de détatouage au laser avec supervision médicale pour les professionnels de beauté.

Cet accompagnement médical et la formation complète déployée par Keros te permettent à ce jour de détatouer de manière sécurisée, sereine, et 100 % légale.


On insiste : sécurité (pour tes clients), sérénité (pour toi) et légalité pour l'ensemble du protocole D-Tattoo-Toi...

Et c'est parce que l'on veille sur la sécurité de nos protocoles que l'on évolue, que l'on ajuste, que l'on affine vers toujours plus de performance et de confort dans la pratique....

Désormais, pour toute action de détatouage dans le cadre du protocole D-tattoo-toi, il est impératif d'utiliser nos films de protection cutanée afin d'offrir aux clients des séances plus sécurisées et une meilleure récupération.



Maintenant,
on filme
tout...

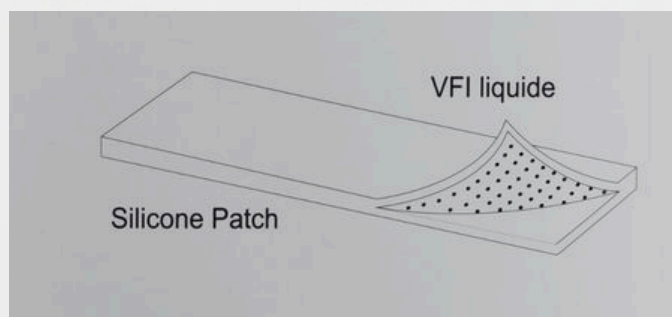

k.

D•tattoo-toi.®

COMMENT UTILISER LE FILM DE PROTECTION DE LA PEAU D-TATTOO-TOI?



Dès l'arrivée du client, après avoir désinfecté la zone avec le Clinisept, on place le film sur la peau et on le laisse agir 3 à 5 minutes, le temps de préparer les réglages et le poste de travail.



Tu peux ensuite passer directement le laser sur le film : il protège la peau et permet une récupération nettement meilleure. Tu verras le tatouage blanchir comme d'habitude.



À la fin de la séance, il est préférable de laisser le film en place encore 3 à 5 minutes. Les actifs qu'il contient apaiseront la peau.

Les films de protection cutanée D-tattoo-toi sont disponibles sur la Boutik' en ligne.

Ces films sont destinés uniquement au détatouage corps, pas pour les sourcils.



k.

KEROS TECHNOLOGY
contact@keros-technology.fr
04 74 24 83 58

